


Smart 产品说明


手术外科工具盒基础版

Straumann® 手术外科工具盒基础版被用来简化临床的操作步骤而设计无论使用哪个种植体系列，手术外科工具盒基础版都可以驾驭基础和精准种植床预备工作的所有必要器械以及辅助器械（例如 Straumann® 棘轮扳手、SCS 螺丝刀和适配器）和其他计划辅助工具。

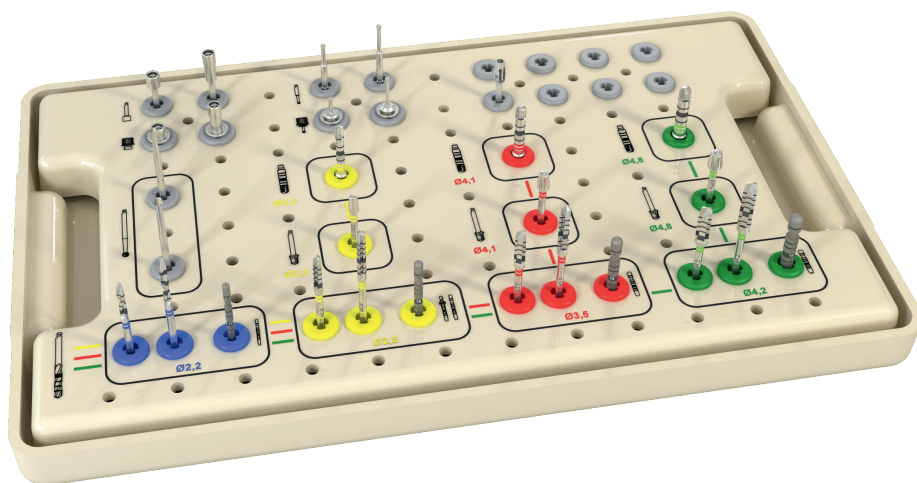

简单且通用


- 可针对任何 Straumann 种植体系列进行手术
- 布局简明，按照手术程序清晰排列
- 精简型器械使手术方案更加高效

货号	货品	尺寸	材质
040.564	 Straumann® 手术外科工具盒基础版	长度 290 mm 宽度 175 mm 高度 62 mm	塑料

Straumann® 手术外科工具盒基础版由上托盘、下托盘和盒盖组成。


Smart 产品说明

上托盘

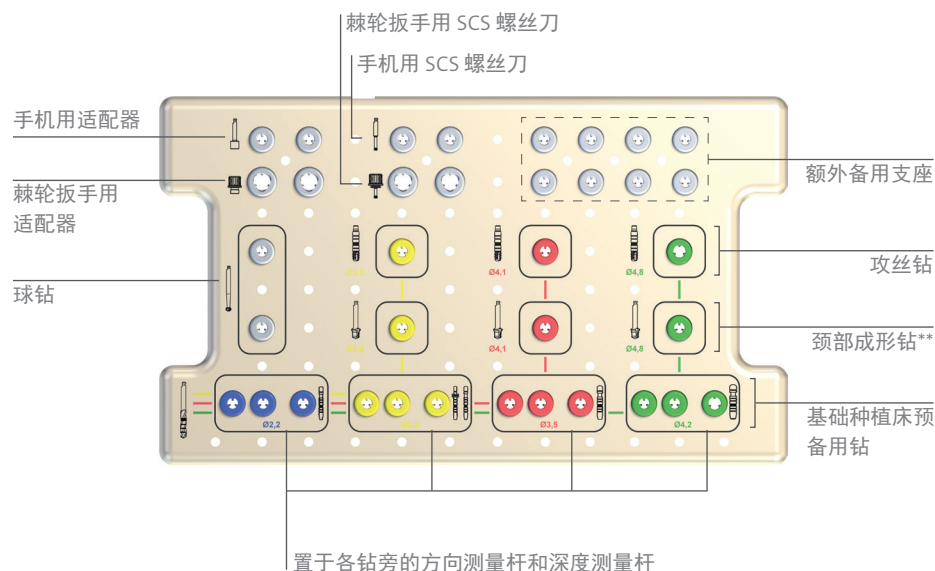

** 若要增加器械长度，则使用钻延长器 (040.563)。

下托盘

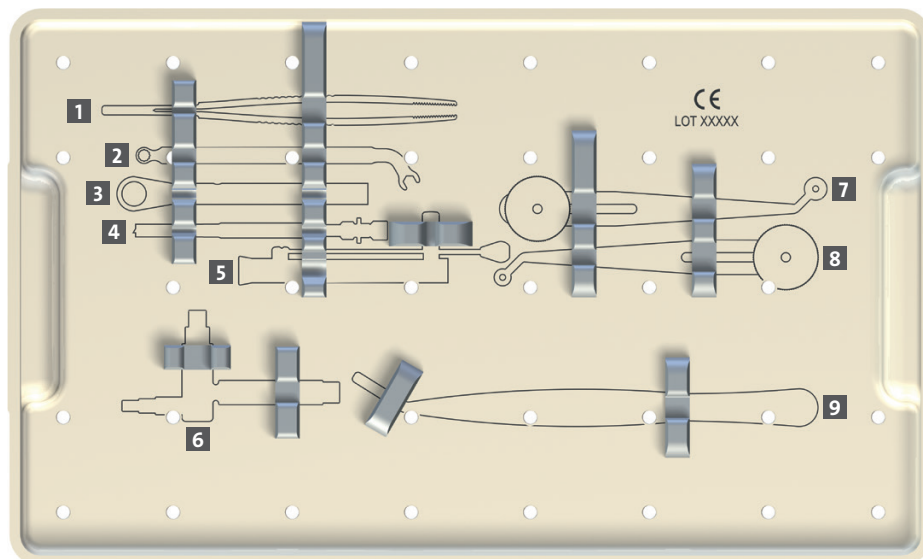


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 镊子 2. 固定扳手 3. 棘轮扳手 4. 棘轮扳手 5. 棘轮扳手用扭矩控制器 6. T形诊断尺 | <ol style="list-style-type: none"> 7. 美学 (RN, WN, NNC) 或骨水平锥柱状 (NC, RC) 种植体用间距测量尺 8. 美学 (RN, WN, NNC) 或骨水平锥柱状 (NC, RC) 种植体用间距测量尺 9. 器械用镊子 |
|---|--|

Smart 产品说明

钻延长器

Straumann® 钻延长器（货号 040.563）可与 Straumann® 颈部成形钻配合使用，以使器械总长度增加 15 mm。这在长颈部成形钻的长度不足时特别有用。

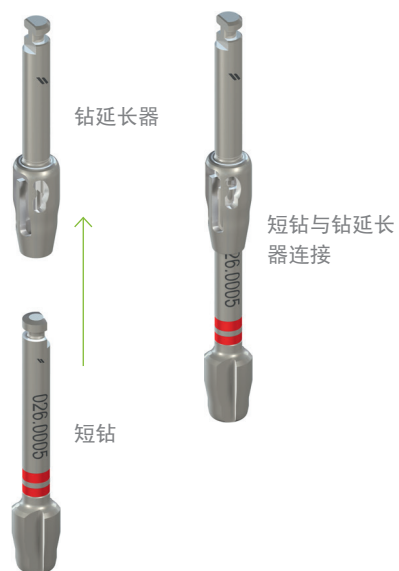


- 与标准牙科轴钻 \varnothing 2.35 mm（闭锁式）和手机兼容
- 弹簧锁与钻契合时发出咔嚓一声，以确保连接牢固
- 帮助进入邻牙长牙冠之间
- 可储存在手术外科工具箱的额外备用支座内
- 纤细形设计极方便进入手术部位

Smart 产品说明

上托盘装配

手术外科工具箱基础版的上托盘可针对任何特定的 Straumann 种植体系列进行装配。根据推荐的手术，您应将基础种植床预备用钻、颈部成形钻和攻丝钻放入相应的手术盒器械支座内。

美学 (SP) 种植体系列的装配

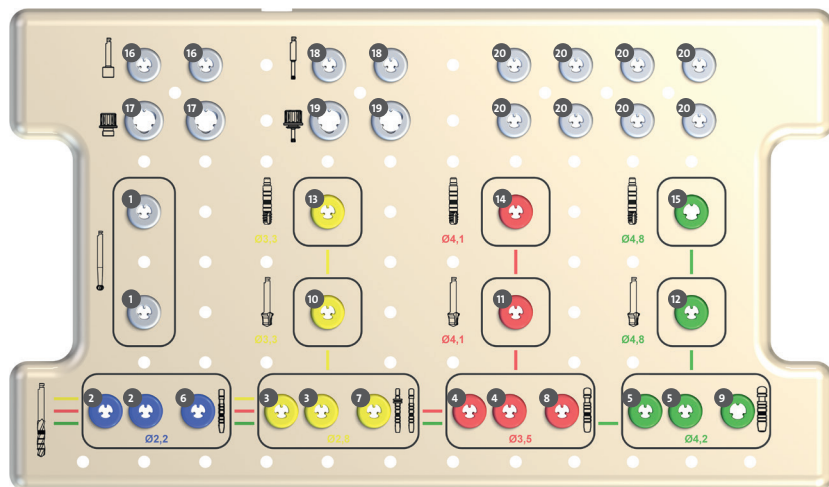


编号	货号	货品/尺寸	材质
1	044.022/044.004	 球钻	不锈钢
2	044.210/044.211	 先锋钻 Ø 2.2 mm, 短/长	不锈钢
3	044.214/044.215	 先锋钻 Ø 2.8 mm, 短/长	不锈钢
4	044.250/044.251	 第一扩孔钻 Ø 3.5 mm, 短/长	不锈钢
5	044.254/044.255	 第二扩孔钻 Ø 4.2 mm, 短/长	不锈钢
6	046.703	 方向测量杆 Ø 2.2 mm	钛
7	046.704 或 046.705	 带间距测量尺的深度测量杆 Ø 2.2/2.8 mm 或深度测量杆 Ø 2.8 mm	钛
8	046.706	 深度测量杆 Ø 3.5 mm	钛
9	046.707	 深度测量杆 Ø 4.2 mm	钛
10	044.086	 SP 颈部成形钻 Ø 2.8 mm, 短*	不锈钢
11	044.088	 SP 颈部成形钻 Ø 3.5 mm, 短*	不锈钢
12	044.084	 SP 颈部成形钻 Ø 4.2 mm, 短*	不锈钢
13	044.575	 S/SP 攻丝钻 Ø 3.3 mm	不锈钢/TAN
14	044.577	 S/SP 攻丝钻 Ø 4.1 mm	不锈钢/TAN
15	044.579	 S/SP 攻丝钻 Ø 4.8 mm	不锈钢/TAN
16	046.471/046.470	 手机用适配器, 短/超短	不锈钢
17	046.461/046.460	 棘轮扳手用适配器, 短/超短	不锈钢
18	046.411/046.410	 手机用 SCS 螺丝刀, 短/超短	Cronidur® 30
19	046.401/046.400	 棘轮扳手用 SCS 螺丝刀, 短/超短	Cronidur® 30
20		额外支座可用于钻延长器、球钻、加长型器械, 或者额外的方向测量杆和深度测量杆。	

TAN = 钛铝铝合金

*若要增加器械长度, 则使用钻延长器 (040.563)。

Smart 产品说明

骨水平锥柱状种植体系的装配

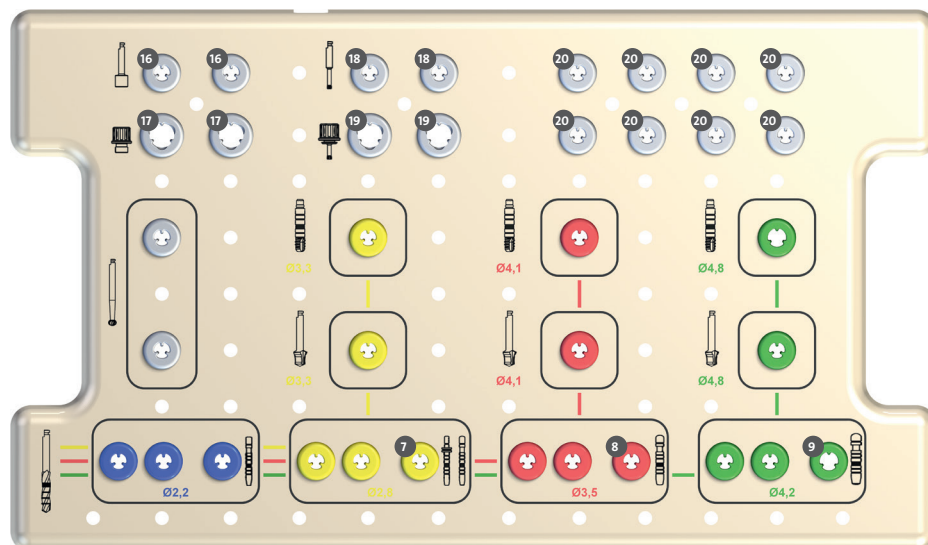

编号	货号	货品/尺寸	材质	
1	044.022/044.004		球钻	不锈钢
2	026.0001/026.0002		骨水平锥柱状先锋钻 Ø 2.2 mm, 短/长	不锈钢
3	026.2200/026.2201		骨水平锥柱状钻 Ø 2.8 mm, 短/长	不锈钢
4	026.4200/026.4201		骨水平锥柱状钻 Ø 3.5 mm, 短/长	不锈钢
5	026.6200/026.6201		骨水平锥柱状钻 Ø 4.2 mm, 短/长	不锈钢
6	046.703		方向测量杆 Ø 2.2 mm	钛
7	046.704 或 046.705		带间距测量尺的深度测量杆 Ø 2.2/2.8 mm 或深度测量杆 Ø 2.8 mm	钛
8	046.706		深度测量杆 Ø 3.5 mm	钛
9	046.707		深度测量杆 Ø 4.2 mm	钛
10	026.0003		骨水平锥柱状颈部成形钻 Ø 3.3 mm, 短*	不锈钢
11	026.0005		骨水平锥柱状颈部成形钻 Ø 4.1 mm, 短*	不锈钢
12	026.0007		骨水平锥柱状颈部成形钻 Ø 4.8 mm, 短*	不锈钢
13	026.0009		骨水平锥柱状攻丝钻 Ø 3.3 mm	不锈钢/TAN
14	026.0010		骨水平锥柱状攻丝钻 Ø 4.1 mm	不锈钢/TAN
15	026.0011		骨水平锥柱状攻丝钻 Ø 4.8 mm	不锈钢/TAN
16	046.471/046.470		手机用适配器, 短/超短	不锈钢
17	046.461/046.460		棘轮扳手用适配器, 短/超短	不锈钢
18	046.411/046.410		手机用 SCS 螺丝刀, 短/超短	Cronidur® 30
19	046.401/046.400		棘轮扳手用 SCS 螺丝刀, 短/超短	Cronidur® 30
20			额外支座可用于钻延长器、球钻、加长型器械, 或者额外的方向测量杆和深度测量杆。	

TAN = 钛铝钕合金

*若要增加器械长度, 则使用钻延长器 (040.563)。

Smart 产品说明

免责声明

Straumann® Smart 是一款专用于指导想要在牙种植领域执行外科手术的全科牙医的综合型培训和教育程序。本程序仅限于分析简单的种植病例，并重点介绍适用于治疗这些病例的精简产品组合。

Straumann® Smart 的所有临床内容（例如文本、病历表、图片和音频）的联合制作人包括来自瑞士苏黎世大学固定和活动修复及齿科材料科学诊疗中心的 Christoph Hämmerle 博士教授、Ronald Jung 博士教授、Francine Brandenburg-Lustenberger 博士和 Alain Fontolliet 博士。

Straumann 不保证 Straumann® Smart 可为想要在种植领域中执行外科手术牙科专业人士提供足够的知识或指导。牙科专业人士应独立负责确保自己在执行种植手术之前获得相应的知识和指导。

使用 Straumann® Smart 并不代表牙科专业人士可以免去对每个个体进行仔细及全面的分析。此外，本产品不对向患者提供的信息之完整性提供任何保证或担保。使用本产品不代表牙科专业人士可以免去通知患者涉及的治疗、产品和风险并获得患者的知情同意等责任。牙科专业人士全权负责确定治疗或产品是否适用于特定患者和环境。牙科种植知识以及相关产品的操作指导始终是必不可少的，并且由牙科专业人士独立负责。牙科专业人士必须始终遵从各个产品的使用说明以及所有法律和法规。

在法律允许的范围内，STRAUMANN 声明对于由提供给患者的任何信息、专业判断错误、产品选择错误或者 STRAUMANN 产品的使用或安装引起的或与之相关的任何直接、间接、惩罚性、继发性或其他损害不承担任何明示或暗示的责任。

所有临床内容以及临床和放射影像均由来自瑞士苏黎世大学固定和活动修复及齿科材料科学诊疗中心的 Christoph Hämmerle 博士教授、Ronald Jung 博士教授、Francine Brandenburg-Lustenberger 博士和 Alain Fontolliet 博士提供。

部分 Straumann 产品可能并非在所有国家/地区均有出售。详情请联系您所在国家/地区的销售代表。

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

2016 年版权所有 © Institut Straumann AG。保留所有权利。
Cronidur® 30 是德国 Energietechnik Essen GmbH 的注册商标。
此处提及的 Straumann® 和/或 Straumann® 的其他商标及标识是 Straumann Holding AG 和/或其附属公司的商标或注册商标。