

Straumann® 种植工具箱 选型指南




目录

A 模块完整列表	5
美学种植体, 骨水平种植体 (SP, BL)	10
锥柱状种植体 (TE)	14
骨水平锥柱状种植体 (BLT)	18
BLX种植体	22
引导式BLX种植体	26

本指南用途

本选型指南用于确定特定适应证所需的工具箱模块和器械。每章都包含一个订单列表和一个使用概述，展示了如何组装各个部件。

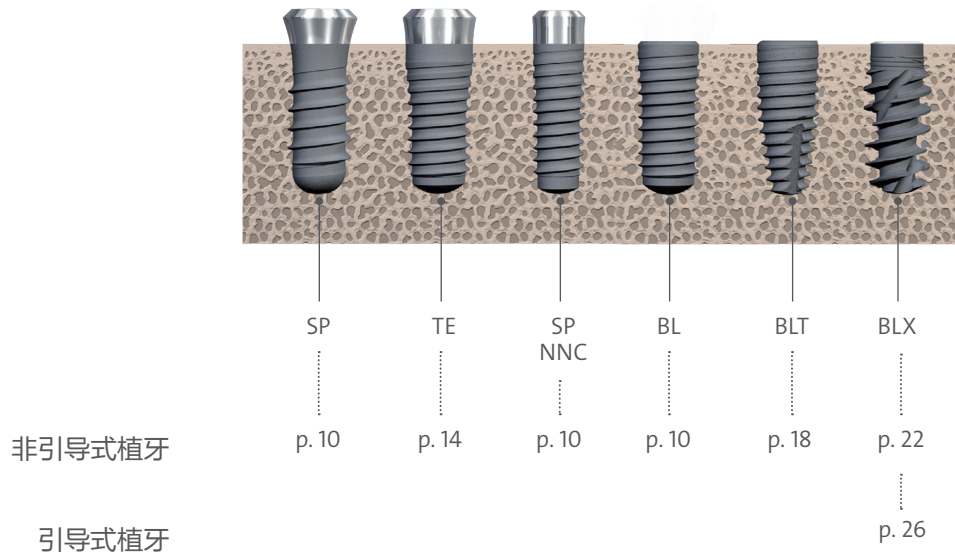

A 模块完整列表


本章展示了 A 模块的所有必选和可选器械。

A 模块




A 模块		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块



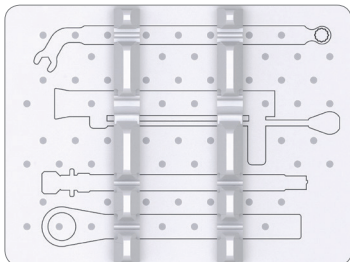

棘轮扳手托盘

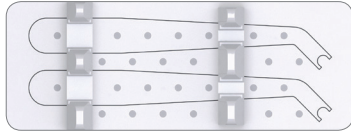


棘轮扳手托盘			
货号	图片	产品	适应症
041.766		A 模块, 棘轮扳手托盘	
046.119		棘轮扳手	
046.049		扭矩控制器	
066.1100		扭矩控制器	BLX
046.064		固定扳手	


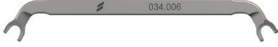
解除器托盘




解除器托盘			
货号	图片	产品	适应症
041.767		解除器托盘	
026.0073		Loxim 解除器 S	BLT SC
026.2558		Loxim 解除器 N	S, SP, TE, BL, BLT
026.4558		Loxim 解除器 R/W	S, SP, TE, BL, BLT

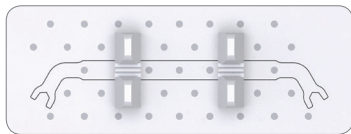


止停器托盘




止停器托盘		
货号	图片	产品
041.768		止停器托盘
034.006		止停器, 引导式

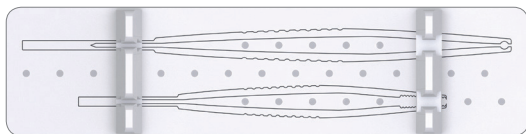镊子托盘




镊子托盘		
货号	图片	产品
041.770		镊子托盘
046.110		器械镊子
046.095		尖端有钛等离子涂层的镊子

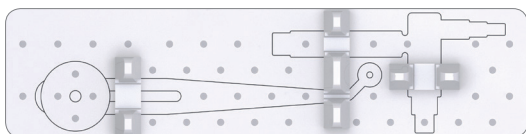

手术设计辅助工具托盘



手术设计辅助工具托盘			
货号	图片	产品	适应症
041.769		手术设计辅助工具托盘	S, SP, TE,
046.147		T型诊断尺	S, SP, TE, BL, BLT
046.148		软组织水平种植体 间距尺	S, SP, TE,
026.0901		骨水平种植体间距尺	BL, BLT

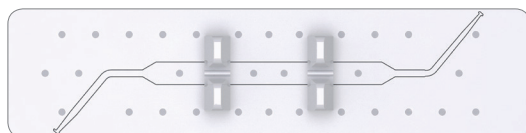种植体测深杆托盘



种植体测深杆托盘		
货号	图片	产品
041.771		种植体测深杆托盘
066.2000		种植体测深杆

SCS 螺丝刀套装



SCS 螺丝刀套装		
货号	图片	产品
041.764		垫圈托盘 3小 + 3大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长


AS 螺丝刀套装



AS 螺丝刀套装		
货号	图片	产品
041.764		垫圈托盘 3小 + 3大
046.789		AS 螺丝刀, 适用于手机, 超 短
046.790		AS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.791		AS 螺丝刀, 适用于手机, 长
046.786		AS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 超短*
046.787		AS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 短*
046.788		AS 螺丝刀, 适用于棘轮 扳手, 长*
041.765		垫圈托盘 3中 + 3大

*将适用于棘轮扳手的 AS 螺丝刀的操作辅助装置单独存放在 041.765 垫圈托盘中

取骨钻套装

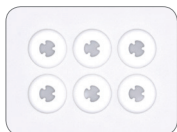

取骨钻套装			
货号	图片	产品	适应症
041.762		垫圈托盘 6 小	
044.304		取骨钻 RN	S, SP, TE
044.305		取骨钻 WN	S, SP, TE
026.0070		取骨钻, 椭圆形平台 SC	BL, BLT
026.0022		BL 取骨钻 1	BL, BLT, BLX
026.0023		BL 取骨钻 2	BL, BLT, BLX
026.0024		BL 取骨钻 3	BL, BLT, BLX

48 小时器械



48 小时器械			
货号	图片	产品	适应症
041.763		垫圈托盘 6 大	
80103		48 小时取出器械 RN/WN	S, SP, TE
80087		48 小时取出器械 RN/WN	S, SP, TE
026.0072		48 小时取出器械 SC	BLT
026.2048		48 小时取出器械 NC	BL, BLT
026.4048		48 小时取出器械 RC	BL, BLT



订单列表：美学种植体，骨水平种植体

A 模块 – 订单列表

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块
041.766		A 模块, 棘轮扳手托盘
046.119		棘轮扳手
046.049		扭矩控制器
046.064		固定扳手
041.767		解除器托盘
026.2558		Loxim 解除器 N
026.4558		Loxim 解除器 R/W
041.764		垫圈托盘 3小+3大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长

A 模块软组织水平专用器械

用于美学种植体系列

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
041.764		垫圈托盘 3小+3大
044.304		取骨钻 RN
044.305		取骨钻 WN
80103		48 小时取出器械 RN/WN
80087		48 小时取出器械 RN/WN

A 模块骨水平专用器械

用于骨水平种植体系列

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
041.764		垫圈托盘 3小+3大
026.0022		BL 取骨钻 1
026.0023		BL 取骨钻 2
026.0024		BL 取骨钻 3
026.2048		48 小时取出器械 NC
026.4048		48 小时取出器械 RC

有关其他工具（手术设计辅助工具，镊子，AS 螺丝刀），请参阅第 5 页 A 模块完整列表。



订单列表：美学种植体，骨水平种植体

B 模块 – 订单列表

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
041.776		Straumann® 种植工具箱, B 模块
041.779		B 模块, 平行壁器械托盘
040.563		钻头延长杆
044.003		球钻 Ø 2.3 mm
044.004		球钻 Ø 3.1 mm
026.0056		针形定导钻, 长 Ø 1.6 mm
044.210		1号先锋钻, 短 Ø 2.2 mm
044.214		2号先锋钻, 短 Ø 2.8 mm
044.250		扩孔钻 PRO, 短 Ø 3.5 mm
044.254		扩孔钻 PRO, 短 Ø 4.2 mm
044.211		1号先锋钻, 长, Ø 2.2 mm
044.215		2号先锋钻, 长, Ø 2.8 mm
044.251		扩孔钻 PRO, 长 Ø 3.5 mm
044.255		扩孔钻 PRO, 长 Ø 4.2 mm
046.799		测量杆 Ø 2.2 mm
046.800		测深杆 Ø 2.8 mm
046.802		测深杆 Ø 3.5 mm
046.804		扩孔钻 PRO, 长 Ø 4.2 mm

046.460		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 超短
046.461		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 短
046.470		种植体适配器, 适用于手机, 超短
046.471		种植体适配器, 适用于手机, 短

B 模块软组织水平专用器械

用于美学种植体系列

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
044.086		SP 成型钻, 短 Ø 3.3 mm
044.088		SP 成型钻, 短 Ø 4.1 mm
044.084		SP 成型钻, 短 Ø 4.8 mm
044.575		S/SP 攻丝钻, 短 Ø 3.3 mm
044.577		S/SP 攻丝钻, 短 Ø 4.1 mm
044.579		S/SP 攻丝钻, 短 Ø 4.8 mm

B 模块骨水平专用器械


用于骨水平种植体系列

SP 美学种植体 / BL 骨水平种植体		
货号	图片	产品
026.2303		BL/TE/NNC 成型钻, 短, Ø 3.3 mm
026.4303		BL 成型钻, 短, Ø 4.1 mm
026.6303		BL 成型钻, 短, Ø 4.8 mm
026.2310		BL/TE/NNC 攻丝钻, 短, Ø 3.3 mm
026.4310		BL 攻丝钻, 短, Ø 4.1 mm
026.6310		BL 攻丝钻, 短, Ø 4.8 mm



A 模块设置：美学种植体，骨水平种植体

A 模块
041.761

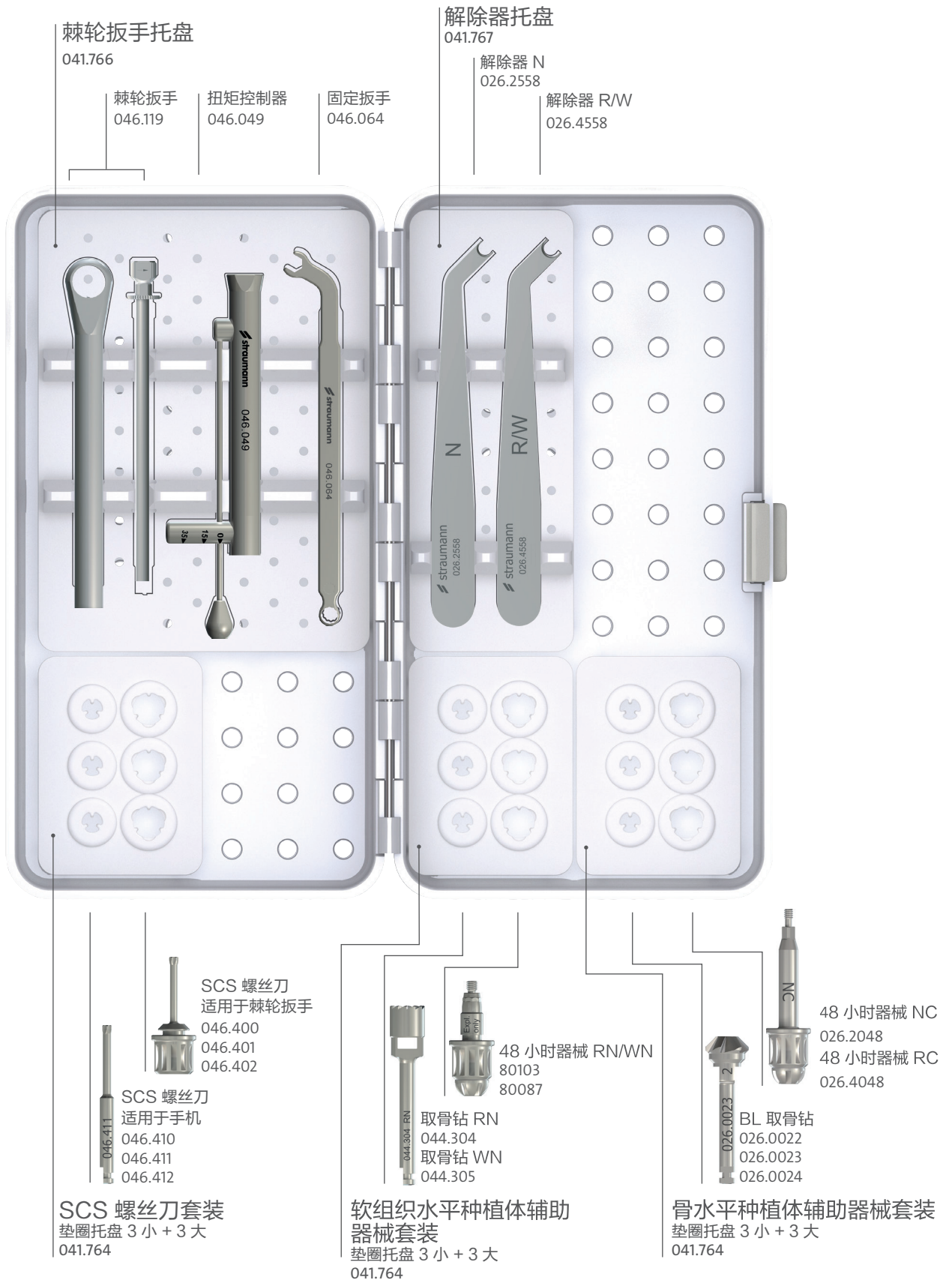



B模块设置：美学种植体，骨水平种植体

平行壁器械托盘
041.779



种植体适配器，适用于棘轮扳手
046.460
046.461



种植体适配器，适用于手机
046.470
046.471




钻头延长杆
040.563

骨水平种植体器械

- BL/TE/NNC 攻丝钻 026.2310
- BL/TE/NNC 成型钻 026.2303
- BL 攻丝钻 026.4310
- BL 成型钻 026.4303
- BL 攻丝钻 026.6310
- BL 成型钻 026.6303

软组织水平种植体器械

- S/SP 攻丝钻 044.575
- S/SP 攻丝钻 044.577
- S/SP 攻丝钻 044.579
- SP 成型钻 044.086
- SP 成型钻 044.088
- SP 成型钻 044.084

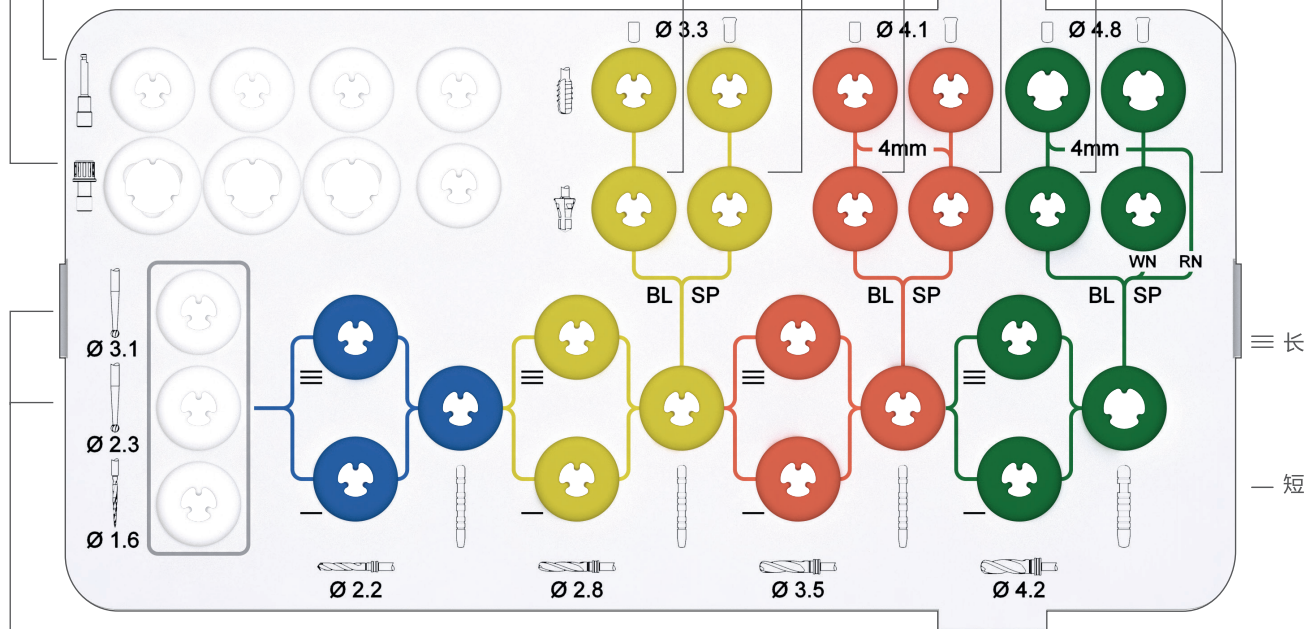

球钻
044.004
044.003



针形定导钻
026.0056



1号先锋钻
044.211
044.210




2号先锋钻
044.215
044.214




扩孔钻 PRO
044.251
044.250



扩孔钻 PRO
044.255
044.254

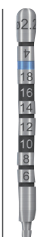

测量杆
046.799

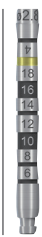

测深杆
046.800



测深杆
046.802



测深杆
046.804



订单列表： 锥柱状种植体

A 模块 – 订单列表

TE 锥柱状种植体		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块
041.766		棘轮扳手托盘
046.119		棘轮扳手
046.049		扭矩控制器
046.064		固定扳手
041.767		解除器托盘
026.2558		Loxim 解除器 N
026.4558		Loxim 解除器 R/W
041.764		垫圈托盘 3小 + 3大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长

041.762		垫圈托盘 6小
044.304		取骨钻 RN
044.305		取骨钻 WN
041.763		垫圈托盘 6大
80103		48小时取出器械 RN/WN
80087		48小时取出器械 RN/WN

有关其他工具（手术设计辅助工具，镊子，AS 螺丝刀），请参阅第 5 页 A 模块完整列表。



订单列表：锥柱状种植体

B 模块 – 订单列表


TE 锥柱状种植体		
货号	图片	产品
041.776		Straumann® 种植工具盒, B 模块, 基础 + 盖子
041.778		B 模块, 基础托盘
040.563		钻头延长杆
044.003		球钻, Ø 2.3 mm
044.004		球钻, Ø 3.1 mm
026.0056		针形定导钻, 长, Ø 1.6 mm
044.210		1 号先锋钻, 短, Ø 2.2 mm
044.214		2 号先锋钻, 短, Ø 2.8 mm
044.250		扩孔钻 PRO, 短, Ø 3.5 mm
044.254		扩孔钻 PRO, 短, Ø 4.2 mm
044.211		1 号先锋钻, 长, Ø 2.2 mm
044.215		2 号先锋钻, 长, Ø 2.8 mm
044.251		扩孔钻 PRO, 长, Ø 3.5 mm
044.255		扩孔钻 PRO, 长, Ø 4.2 mm
044.701		TE 成型钻, 短, Ø 3.3 mm
044.705		TE 成型钻, 短, Ø 4.1 mm
044.703		TE 成型钻, 短, Ø 4.8 mm

026.2310		TE 成型钻, 短, Ø 3.3 mm
026.4310		BL/TE 攻丝钻, 短, Ø 4.1 mm
026.6310		BL/TE 攻丝钻, 短, Ø 4.8 mm
046.799		测量杆, Ø 2.2 mm, BLT
046.800		测深杆, Ø 2.8 mm, BLT
046.802		测深杆, Ø 3.5 mm, BLT
046.804		测深杆, Ø 4.2 mm, BLT
046.460		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 超短
046.461		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 短
046.470		种植体适配器, 适用于手机, 超短
046.471		种植体适配器, 适用于手机, 短



A 模块设置：锥柱状种植体

A 模块
041.761

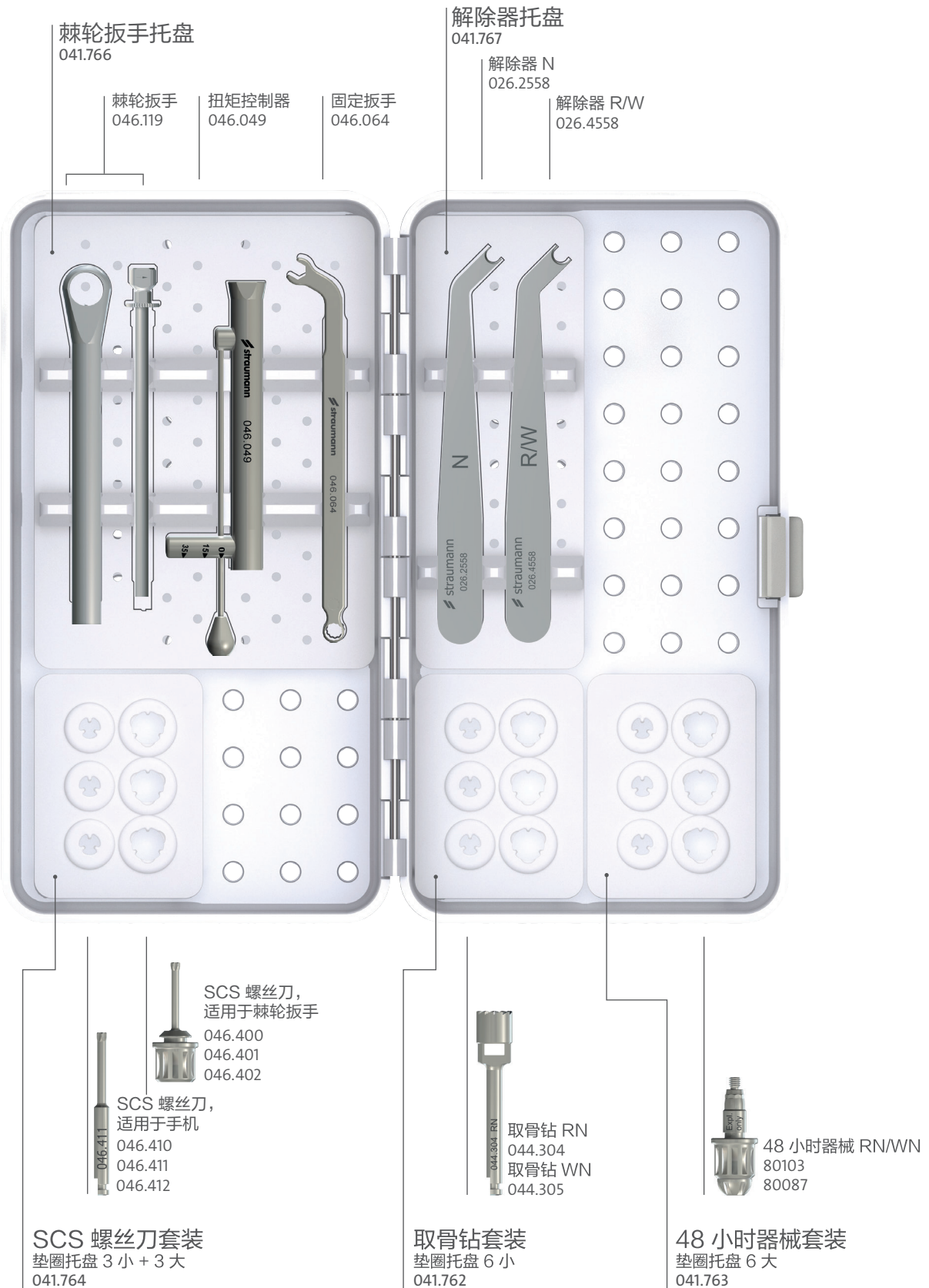




B 模块设置：锥柱状种植体

基础托盘

041.778

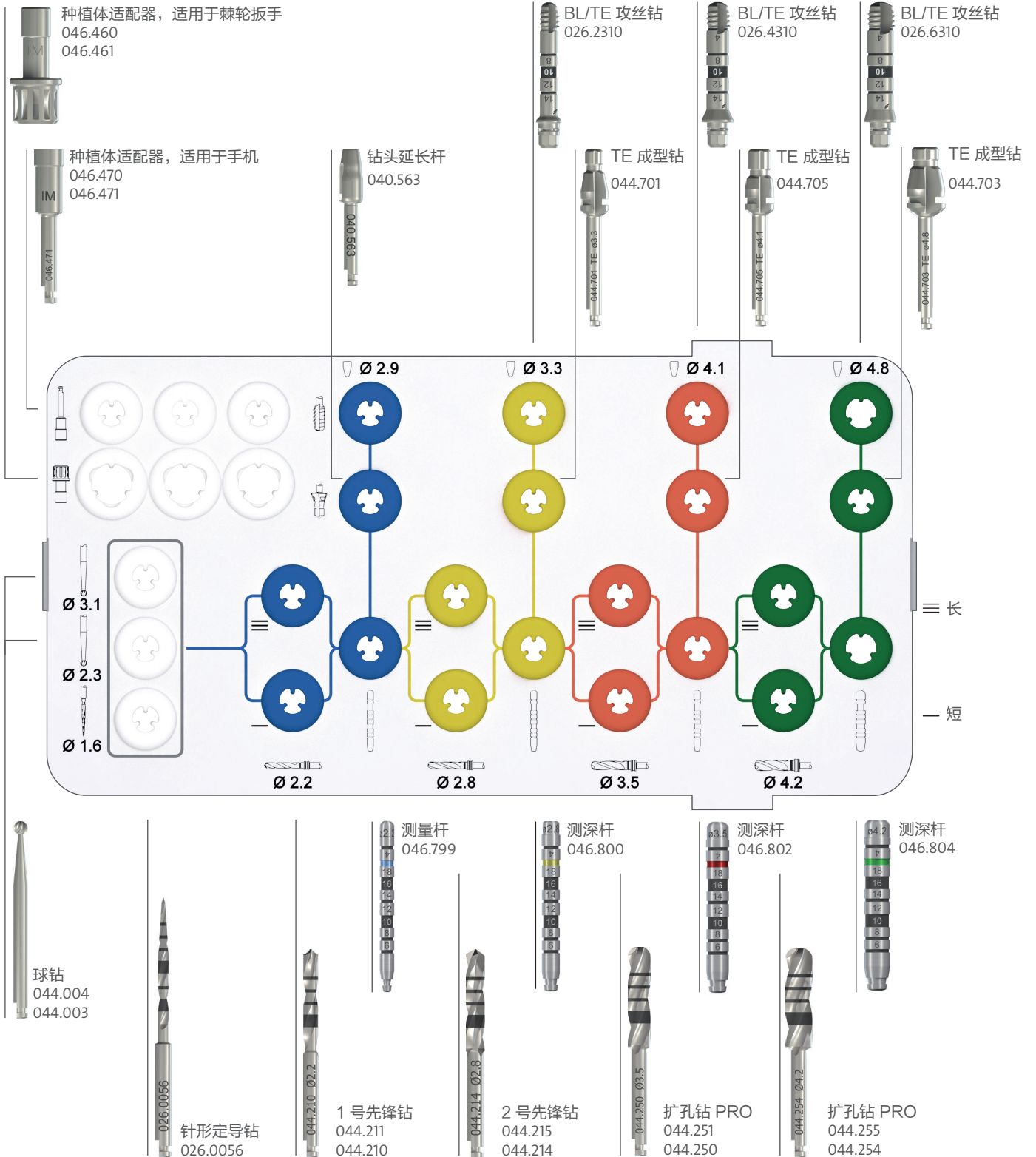



订单列表：骨水平锥柱状种植体

A 模块 – 订单列表

BLT 骨水平锥柱状种植体		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块
041.766		A 模块, 棘轮扳手托盘
046.119		棘轮扳手
046.049		扭矩控制器
046.064		固定扳手
041.767		解除器托盘
026.2558		Loxim 解除器 N
026.4558		Loxim 解除器 R/W
041.767		解除器托盘*
026.0073		Loxim 解除器 S*
041.764		垫圈托盘 3 小 + 3 大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长

041.762		垫圈托盘 6 小
026.0022		BL 取骨钻 1
026.0023		BL 取骨钻 2
026.0024		BL 取骨钻 3

A 模块 BLT Ø 2.9 专用器械

用于 BLT Ø 2.9 种植体系列

BLT 骨水平锥柱状种植体 Ø 2.9		
货号	图片	产品
041.763		垫圈托盘 6 大
026.2048		48 小时器械 NC, BLT
026.4048		48 小时器械 RC, BLT
041.764		垫圈托盘 3 小 + 3 大*
026.0070		取骨钻, 椭圆形平台, BLT SC*
026.0072		48 小时器械 SC, BLT SC*
025.0042		SC 种植体适配器, 适用于手机, 长
025.0043		SC 种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 长 BLT SC*

*仅适用于骨水平锥柱状 Small Crossfit® 种植体系列

有关其他工具（手术设计辅助工具，镊子，AS 螺丝刀），请参阅第 5 页 A 模块完整列表。



订单列表：骨水平锥柱状种植体

B 模块 – 订单列表

BLT 骨水平锥柱状种植体		
货号	图片	产品
041.776		Straumann® 种植工具盒, B 模块, 基础 + 盖子
041.778		B 模块, 基础托盘
040.563		钻头延长杆
044.003		球钻, \varnothing 2.3 mm
044.004		球钻, \varnothing 3.1 mm
026.0056		针形定导钻, 长, \varnothing 1.6 mm
026.0001		BLT 钻, 短, \varnothing 2.2 mm
026.2200		BLT 钻, 短, \varnothing 2.8 mm
026.4200		BLT 钻, 短, \varnothing 3.5 mm
026.6200		BLT 钻, 短, \varnothing 4.2 mm
026.0002		BLT 钻, 长, \varnothing 2.2 mm
026.2201		BLT 钻, 长, \varnothing 2.8 mm
026.4201		BLT 钻, 长, \varnothing 3.5 mm
026.6201		BLT 钻, 长, \varnothing 4.2 mm
026.0061		BLT 成型钻, 短, \varnothing 2.9 mm
026.0003		BLT 成型钻, 短, \varnothing 3.3 mm
026.0005		BLT 成型钻, 短, \varnothing 4.1 mm
026.0007		BLT 成型钻, 短, \varnothing 4.8 mm

026.0063		BLT 攻丝钻, 长, \varnothing 2.9 mm
026.0009		BLT 攻丝钻, 短, \varnothing 3.3 mm
026.0010		BLT 攻丝钻, 短, \varnothing 4.1 mm
026.0011		BLT 攻丝钻, 短, \varnothing 4.8 mm
046.799		测量杆, \varnothing 2.2mm
046.800		测深计, \varnothing 2.8mm
046.802		测深计, \varnothing 3.5mm
046.804		测深计, \varnothing 4.2mm
046.460		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 超短
046.461		种植体适配器, 适用于棘轮扳手, 短
046.470		种植体适配器, 适用于手机, 超短
046.471		种植体适配器, 适用于手机, 短



A 模块设置：骨水平锥柱状种植体

A 模块
041.761

棘轮扳手托盘
041.766

棘轮扳手
046.119

扭矩控制器
046.049


固定扳手
046.064

解除器托盘
041.767

解除器 N
026.2558

解除器 R/W
026.4558

解除器 S*
026.0073

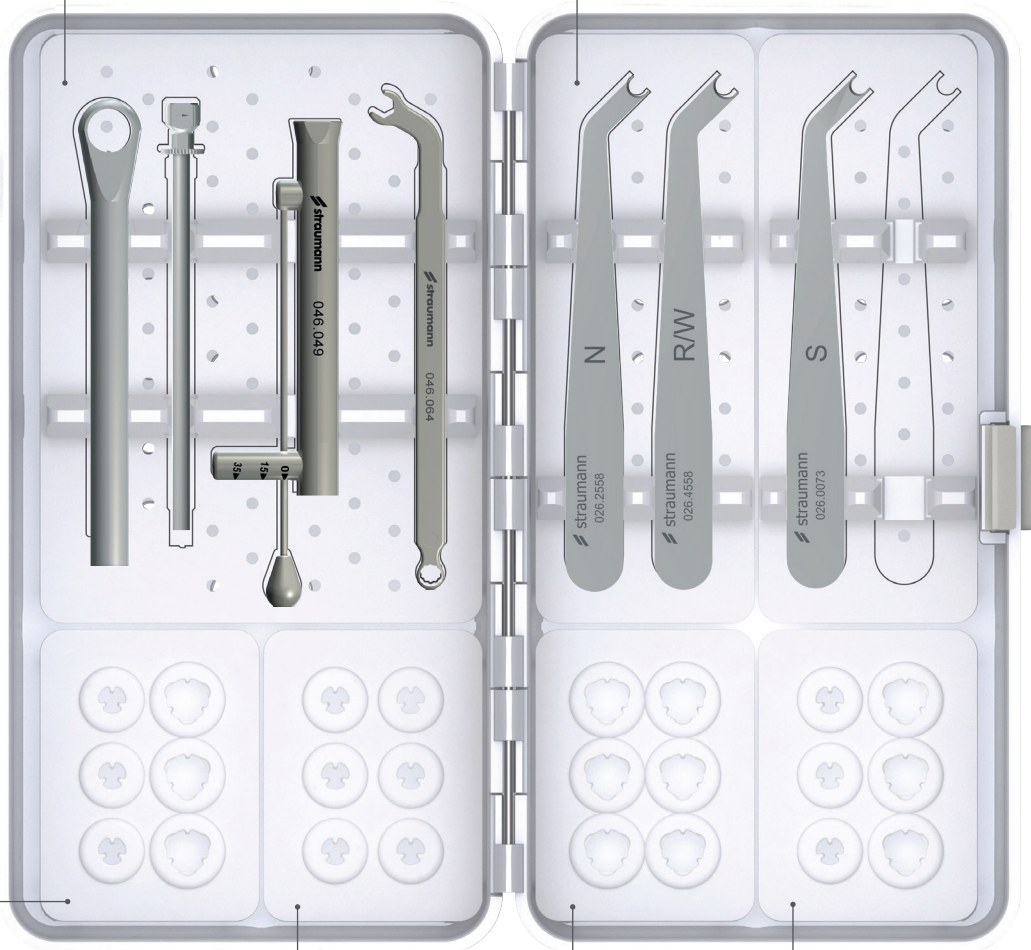

SC 种植体适配器*
适用于棘轮扳手
025.0043



48 小时器械 SC*
026.0072



SCS 螺丝刀
适用于棘轮扳手
046.400
046.401
046.402

SCS 螺丝刀
适用于手机
046.410
046.411
046.412

SCS 螺丝刀套装
垫圈托盘 3 小 + 3 大
041.764



BL 取骨钻
026.0022
026.0023
026.0024

取骨钻套装
垫圈托盘 6 小
041.762



48 小时器械
NC/RC
026.2048
026.4048

48 小时器械
套装
垫圈托盘 6 大
041.763



取骨钻 SC*
026.0070




SC 种植体适配器*
适用于手机 025.0042

SC 辅助器械套装*
垫圈托盘 3 小 + 3 大
041.764



B 模块设置：骨水平锥柱状种植体

基础托盘
041.778

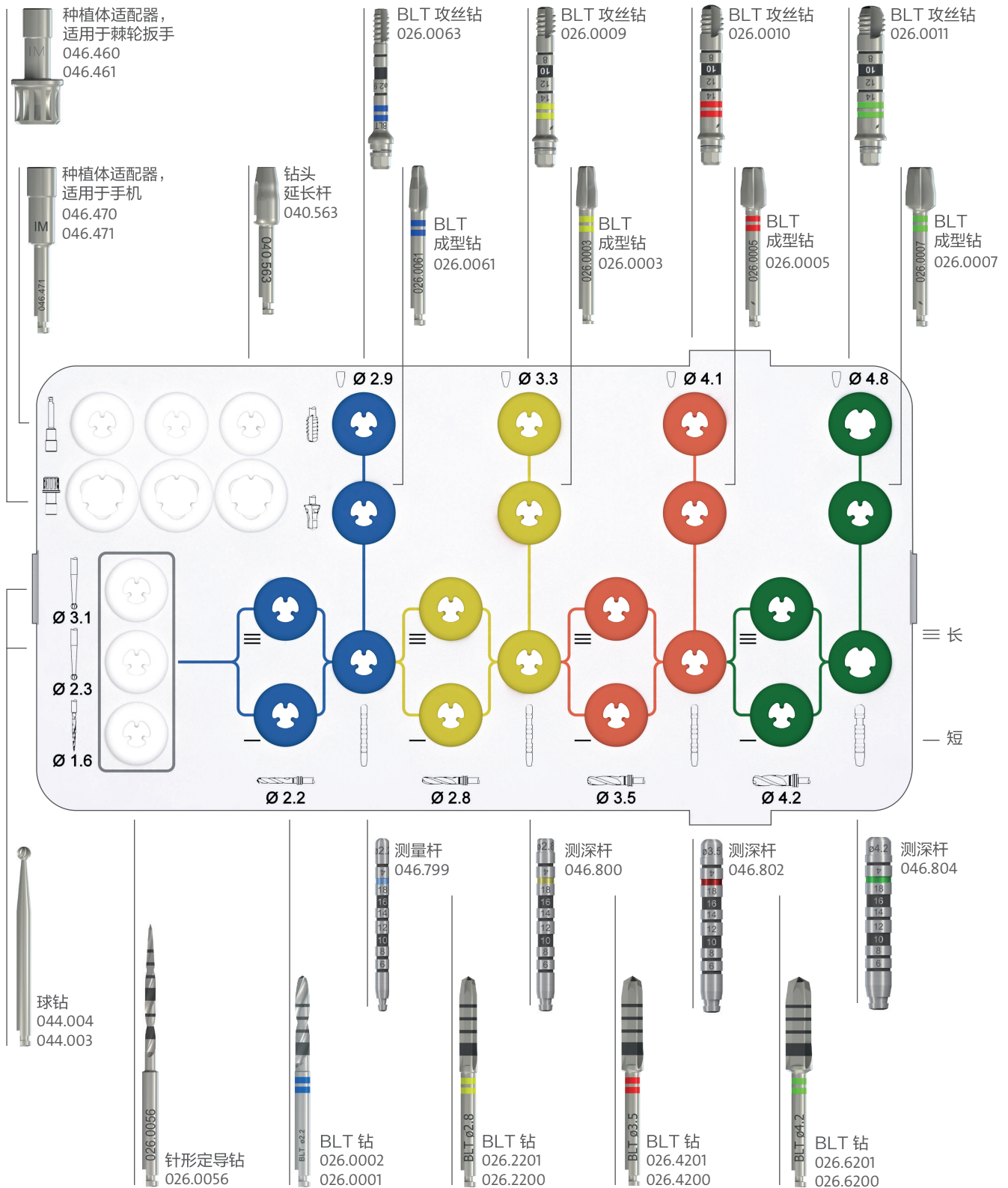



订单列表: BLX种植体

A 模块 – 订单列表

BLX		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块
041.766		A 模块, 棘轮扳手托盘
046.119		棘轮扳手
066.1100		BLX 扭矩控制器
046.064		固定扳手
041.764		垫圈托盘 3 小 + 3 大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长
041.771		种植体测深杆托盘
066.2000		种植体测深杆
041.764		垫圈托盘 3 小 + 3 大
026.0022		BL 取骨钻 1
026.0023		BL 取骨钻 2
026.0024		BL 取骨钻 3

有关其他工具, 镊子, AS 螺丝刀, 请参阅第 5 页 A 模块完整列表。



订单列表: BLX种植体

B 模块 – 订单列表


BLX		
货号	图片	产品
041.776		Straumann® 种植工具盒, B 模块, 基础 + 盖子
041.777		B 模块, 全锥形器械托盘
040.563		钻头延长杆
044.003		球钻, Ø 2.3 mm
044.004		球钻, Ø 3.1 mm
026.0056		针形定导钻, 长, Ø 1.6 mm
066.1301		X VeloDrill™, 短, Ø 2.2 mm
066.1302		X VeloDrill™, 短, Ø 2.8 mm
066.1303		X VeloDrill™, 短, Ø 3.2 mm
066.1304		X VeloDrill™, 短, Ø 3.5 mm
066.1305		X VeloDrill™, 短, Ø 3.7 mm
066.1306		X VeloDrill™, 短, Ø 4.2 mm
066.1307		X VeloDrill™, 短, Ø 4.7 mm
066.1308		X VeloDrill™, 短, Ø 5.2 mm
066.1309		X VeloDrill™, 短, Ø 6.2 mm
066.1701		X VeloDrill™, 长, Ø 2.2 mm
066.1702		X VeloDrill™, 长, Ø 2.8 mm
066.1703		X VeloDrill™, 长, Ø 3.2 mm
066.1704		X VeloDrill™, 长, Ø 3.5 mm
066.1705		X VeloDrill™, 长, Ø 3.7 mm

066.1706		X VeloDrill™, 长, Ø 4.2 mm, BLX
066.1707		X VeloDrill™, 长, Ø 4.7 mm, BLX
046.799		测量杆, Ø 2.2 mm
046.800		测深杆, Ø 2.8 mm
046.801		测深杆, Ø 3.2 mm
046.802		测深杆, Ø 3.5 mm
046.803		测深杆, Ø 3.7 mm
046.804		测深杆, Ø 4.2 mm
046.805		测深杆, Ø 4.7 mm
046.806		测深杆, Ø 5.2 mm
046.807		测深杆, Ø 6.5 mm
066.4201		种植体螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短, BLX
066.4202		种植体螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长, BLX
066.4101		种植体螺丝刀, 适用于手机, 短, BLX
066.4102		种植体螺丝刀, 适用于手机, 长, BLX



A 模块设置: BLX种植体


A 模块
041.761

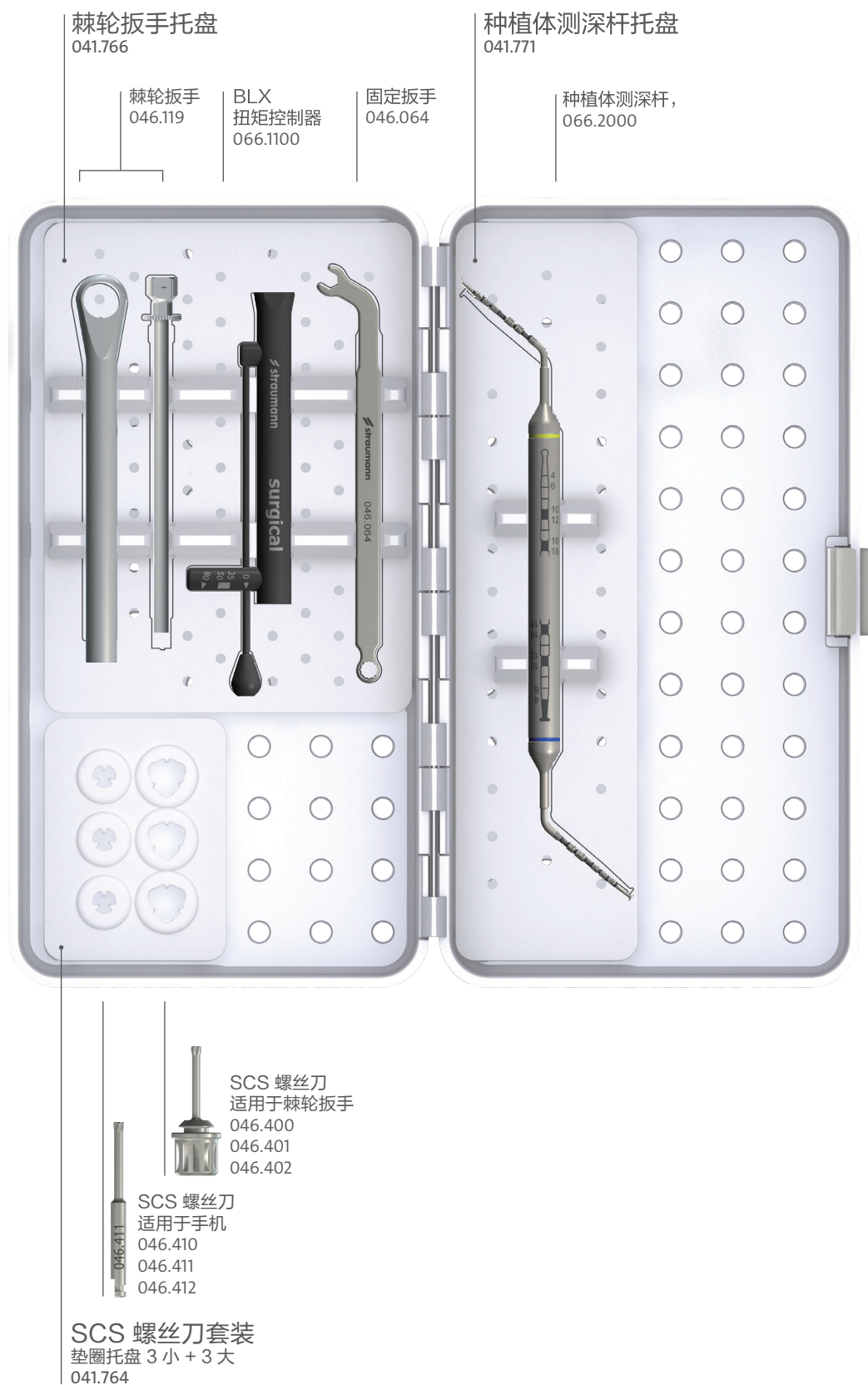


BLX B 模块设置: BLX种植体

全锥形器械托盘 041.777


种植体螺丝刀,
适用于棘轮扳手
066.4201
066.4202




种植体螺丝刀
适用于手机
066.4101
066.4102




钻头延长杆
040.563




测量杆
046.799




测深杆
046.800




测深杆
046.801




测深杆
046.802




测深杆
046.803




测深杆
046.804




测深杆
046.805




测深杆
046.806




测深杆
046.807



测深杆
046.808



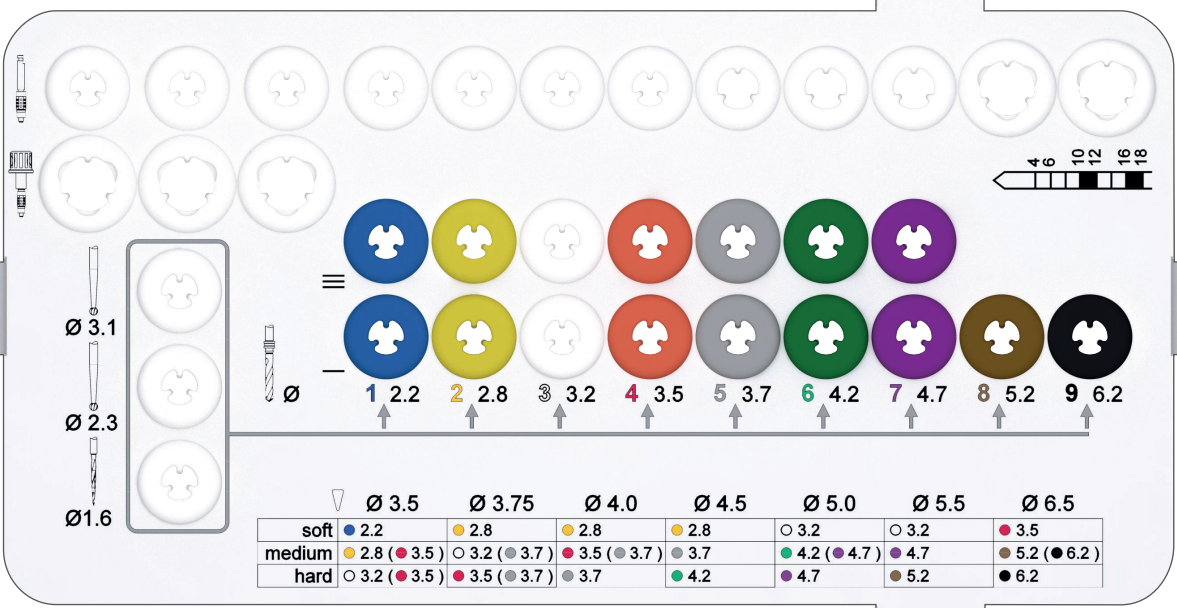



托盘包含 18 个孔位，按直径和长度排列。直径从 3.1 到 6.2，长度分为长和短。颜色编码与下方表格一致。

	Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.5
soft	● 2.2	● 2.8	● 2.8	● 2.8	○ 3.2	○ 3.2	● 3.5
medium	● 2.8 (● 3.5)	○ 3.2 (● 3.7)	● 3.5 (● 3.7)	● 3.7	● 4.2 (● 4.7)	● 4.7	● 5.2 (● 6.2)
hard	○ 3.2 (● 3.5)	● 3.5 (● 3.7)	● 3.7	● 4.2	● 4.7	● 5.2	● 6.2


球钻
044.004
044.003




针形定导钻
026.0056




X VeloDrill™
066.1701
066.1301




X VeloDrill™
066.1702
066.1302




X VeloDrill™
066.1703
066.1303




X VeloDrill™
066.1704
066.1304




X VeloDrill™
066.1705
066.1305




X VeloDrill™
066.1706
066.1306



X VeloDrill™
066.1707
066.1307



X VeloDrill™
066.1308
066.1309





订单列表：引导式BLX种植体

A 模块 – 订单列表

BLX Guided		
货号	图片	产品
041.761		Straumann® 种植工具箱, A 模块
041.766		A 模块, 棘轮扳手托盘
046.119		棘轮扳手
066.1100		BLX 扭矩控制器
046.064		固定扳手
041.764		垫圈托盘 3小 + 3大
046.400		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 超短
046.401		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 短
046.402		SCS 螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 长
046.410		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 超短
046.411		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 短
046.412		SCS 螺丝刀, 适用于手机, 长
041.771		种植体测深杆托盘
066.2000		种植体测深杆
041.764		垫圈托盘 3小 + 3大
026.0022		BL 取骨钻 1
026.0023		BL 取骨钻 2
026.0024		BL 取骨钻 3
041.768		止停器托盘
034.006		止停器, 引导式

B 模块 – 订单列表

BLX Guided		
Art. No.	Image	Product
041.776		Straumann® 种植工具箱, B 模块, 基础 + 盖子
041.780		B 模块, 引导式手术用全锥形器械托盘
034.010		黏膜冲头, Ø 3.4 mm
034.011		黏膜冲头, Ø 4.0 mm
034.012		黏膜冲头, Ø 4.7 mm
034.215		切削刀, Ø 2.8 mm
034.415		切削刀, Ø 3.5 mm
034.615		切削刀, Ø 4.2 mm
066.1301		X VeloDrill™, 短, Ø 2.2 mm
066.1302		X VeloDrill™, 短, Ø 2.8 mm
066.1303		X VeloDrill™, 短, Ø 3.2 mm
066.1304		X VeloDrill™, 短, Ø 3.5 mm
066.1305		X VeloDrill™, 短, Ø 3.7 mm
066.1306		X VeloDrill™, 短, Ø 4.2 mm
066.1307		X VeloDrill™, 短, Ø 4.7 mm
066.1308		X VeloDrill™, 短, Ø 5.2 mm
066.1309		X VeloDrill™, 短, Ø 6.2 mm
066.1501		X VeloDrill™, 中, Ø 2.2 mm
066.1502		X VeloDrill™, 中, Ø 2.8 mm
066.1503		X VeloDrill™, 中, Ø 3.2 mm

有关其他工具、镊子、AS 螺丝刀, 请参阅第 5 页 A 模块完整列表。



订单列表：引导式BLX种植体

066.1504		X VeloDrill™, 中, Ø 3.5 mm
066.1505		X VeloDrill™, 中, Ø 3.7 mm
066.1506		X VeloDrill™, 中, Ø 4.2 mm
066.1701		X VeloDrill™, 长, Ø 2.2 mm
066.1702		X VeloDrill™, 长, Ø 2.8 mm
066.1703		X VeloDrill™, 长, Ø 3.2 mm
066.1704		X VeloDrill™, 长, Ø 3.5 mm
066.1705		X VeloDrill™, 长, Ø 3.7 mm
066.1706		X VeloDrill™, 长, Ø 4.2 mm
066.1707		X VeloDrill™, 长, Ø 4.7 mm
046.799		测量杆, Ø 2.2 mm
046.800		测深杆, Ø 2.8 mm
046.801		测深杆, Ø 3.2 mm
046.802		测深杆, Ø 3.5 mm
046.803		测深杆, Ø 3.7 mm
046.804		测深杆, Ø 4.2 mm
046.805		测深杆, Ø 4.7 mm
046.806		测深杆, Ø 5.2 mm
046.807		测深杆, Ø 6.5 mm
066.4401		引导式种植体螺丝刀, 适用于棘轮扳手, 螺丝固位
066.4403		引导式种植体螺丝刀, 适用于手机
066.4404		引导式种植体螺丝刀, 适用于棘轮扳手


C 模块 – 订单列表

BLX Guided		
货号	图片	产品
041.772		Straumann® 种植工具箱, C 模块, 引导式手术
034.291		牙钻手柄, Ø 2.2 mm, 1 mm/3 mm
034.292		牙钻手柄, Ø 2.8 mm, 1 mm/3 mm
034.293		牙钻手柄, Ø 3.2 mm, 1 mm/3 mm
034.294		牙钻手柄, Ø 3.5 mm, 1 mm/3 mm
034.295		牙钻手柄, Ø 3.7 mm, 1 mm/3 mm
034.296		牙钻手柄, Ø 4.2 mm, 1 mm/3 mm
034.284		用于导板固位杆的钻头, Ø 1.3 mm
034.282		导板固位杆, Ø 1.3 mm
034.298		导板固位杆, Ø 2.8/2.8 mm
034.285		导板固位杆, Ø 5/2.8 mm
034.286		导板固位杆, Ø 5/3.2 mm
034.287		导板固位杆, Ø 5/3.5 mm
034.288		导板固位杆, Ø 5/3.7 mm
034.289		导板固位杆, Ø 5/4.2 mm



A 模块设置：引导式BLX种植体


A 模块
041.761

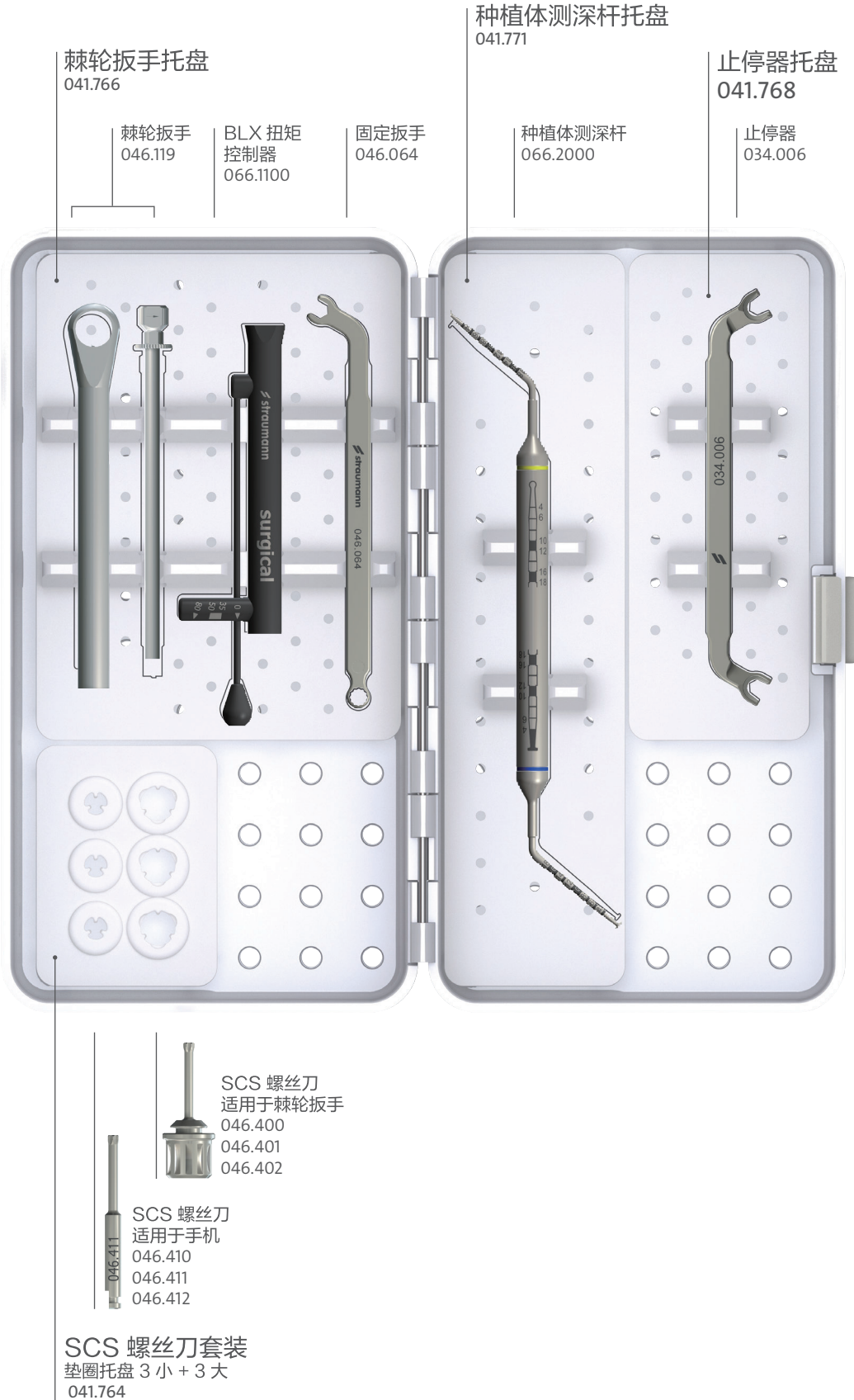




B 模块设置：引导式BLX种植体


引导手术用全锥形器械托盘 041.780




引导式种植体螺丝刀,
适用于棘轮扳手
066.4401
066.4404




引导式种植体螺丝刀,
适用于手机
066.4403




测量杆
046.799




Depth Gauge
046.801




测深杆
046.803




测深杆
046.805




测深杆
046.807




测深杆
046.800




测深杆
046.802




测深杆
046.804




测深杆
046.806

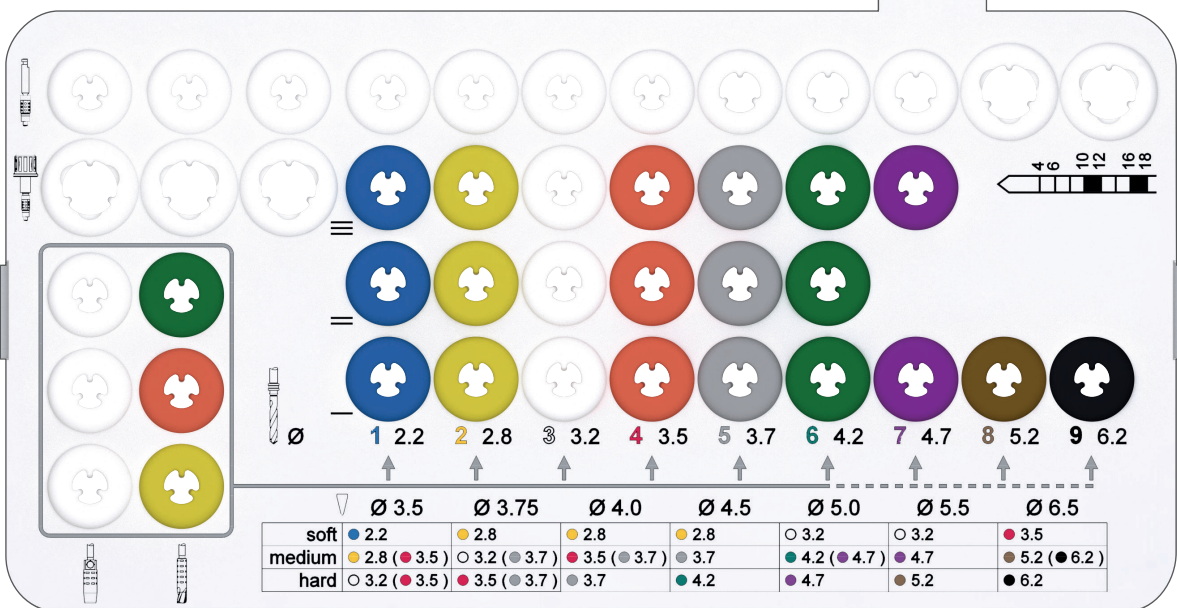


	∅ 3.5	∅ 3.75	∅ 4.0	∅ 4.5	∅ 5.0	∅ 5.5	∅ 6.5
soft	● 2.2	● 2.8	● 2.8	● 2.8	○ 3.2	○ 3.2	● 3.5
medium	● 2.8 (● 3.5)	○ 3.2 (● 3.7)	● 3.5 (● 3.7)	● 3.7	● 4.2 (● 4.7)	● 4.7	● 5.2 (● 6.2)
hard	○ 3.2 (● 3.5)	● 3.5 (● 3.7)	● 3.7	● 4.2	● 4.7	● 5.2	● 6.2




黏膜冲头
034.012
034.011
034.010




切削刀
034.615
034.415
034.215




X VeloDrill™
066.1701
066.1501
066.1301




X VeloDrill™
066.1702
066.1502
066.1302




X VeloDrill™
066.1703
066.1503
066.1303




X VeloDrill™
066.1704
066.1504
066.1304




X VeloDrill™
066.1705
066.1505
066.1305




X VeloDrill™
066.1706
066.1506
066.1306



X VeloDrill™
066.1707
066.1307



X VeloDrill™
066.1308




X VeloDrill™
066.1309



C 模块设置：引导式BLX种植体

C 模块，引导式手术
041.772

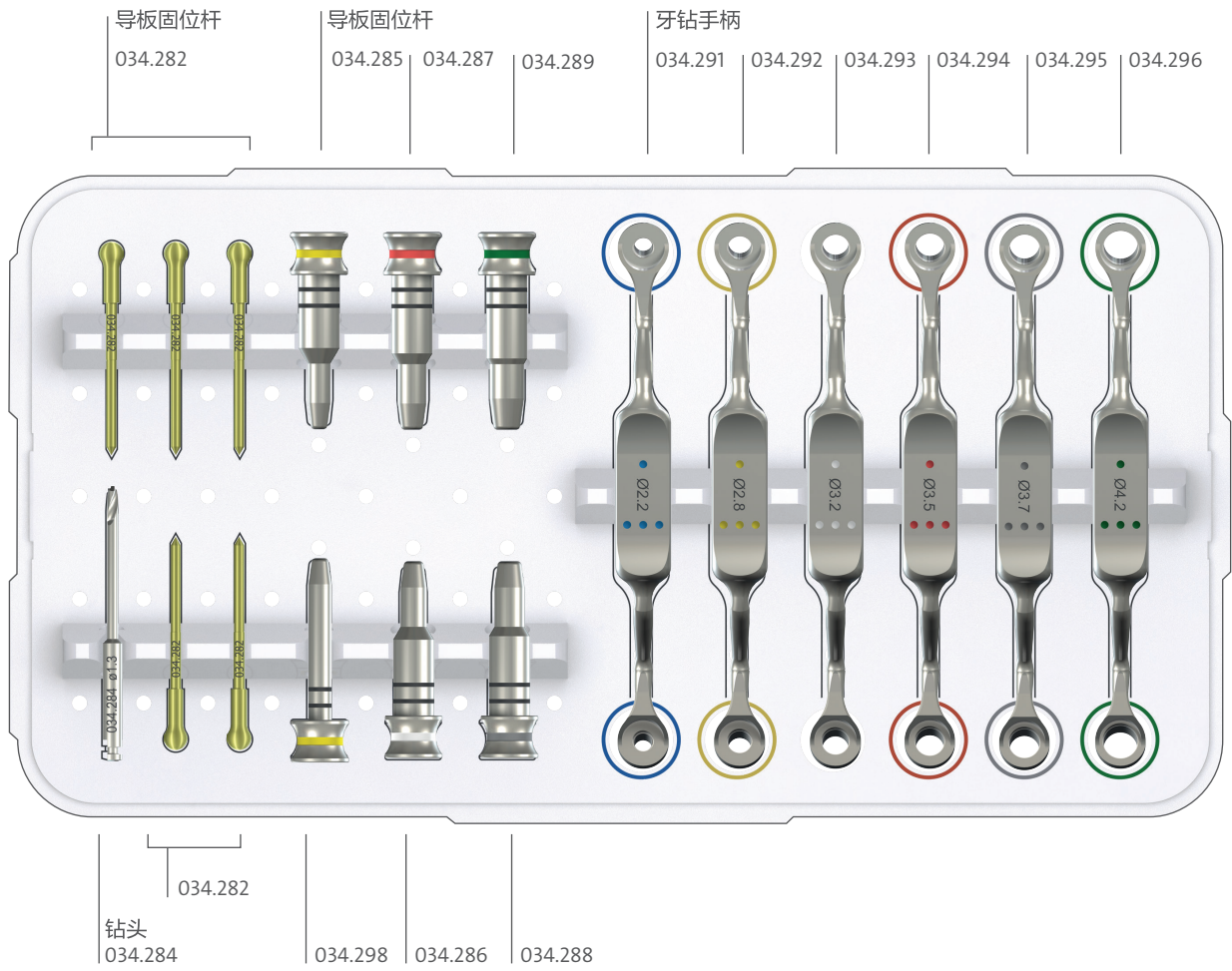



荣获
2019 红点设计奖

全球总部

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, 瑞士
电话: +41 (0)61 965 11 11
传真: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

仅供内部使用

© Institut Straumann AG 版权所有, 2019 年。保留所有权利。
Straumann® 和/或本文中提及的其他 Straumann® 商标和徽标是 Straumann Holding AG 和/或其关联方的商标或注册商标。